

Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia

Patologia Clinica

Accr. Ist. RAS Det. N.1547 Diagnostica di Laboratorio e Det. N. 1549 Servizio Immunotrasfusionale del 15/11/2024

Centro di Riferimento Regionale per Patologia CRP Anemie Ereditarie
(Delib. G.R. 49/34 del 26/11/2013 e 44/35 del 22/09/2017)
Banca Regionale dei "Gruppi Sanguigni Rari"
(All. Delibera G.R. n°52/27 del 23/12/2019)

Modalità di raccolta Urine Test di gravidanza

Esame Beta hCG nelle urine.

Contenitore Provetta non sterile in plastica per la raccolta delle urine.

Preparazione Paziente Non necessaria.

Modalità di raccolta Si può utilizzare un campione di urina prelevato in qualsiasi ora del giorno. Per ottenere risultati migliori si consiglia di utilizzare un campione del mattino poiché la concentrazione di hCG è massima.

Invio e conservazione Il campione è stabile per 8 ore a temperatura ambiente e fino a 72 ore refrigerato a 2-8°C. Non congelare.

Trasporto La provetta urine, ben tappata, deve rimanere in posizione verticale per evitare la fuoriuscita di materiale biologico.

Note Il laboratorio non accetta campioni raccolti in contenitori destinati ad altro uso, anche se accuratamente lavati.

MOD.M38 LABAHO