

Accr. Ist. RAS Det. N.1547 Diagnostica di Laboratorio e Det. N. 1549 Servizio Immunotrasfusionale del 15/11/2024

Centro di Riferimento Regionale per Patologia CRP Anemie Ereditarie
(Delib. G.R. 49/34 del 26/11/2013 e 44/35 del 22/09/2017)
Banca Regionale dei "Gruppi Sanguigni Rari"
(All. Delibera G.R. n°52/27 del 23/12/2019)

Modalità per preparazione Scotch Test

Esame Scotch test : ricerca uova di ossiuri

Contenitore scotch, vetrino portaoggetti.

Preparazione Paziente Non necessaria.

Modalità di raccolta effettuare il prelievo al mattino, prima che il paziente si sia lavato. Aiutandosi con una spatola di legno (o con il manico di un cucchiaino di plastica) applicare la striscia adesiva si scotch nelle pliche anali e lasciare in sede per qualche minuto. Fare aderire bene lo scotch sul vetrino facendo attenzione a non creare piegature. **ATTENZIONE: lo scotch non deve essere più lungo del vetrino.**

Invio e conservazione Consegnare il campione il più presto possibile.

Note I vetrini si devono ritirare gratuitamente presso l'Accettazione del Laboratorio.

MOD.M41 LABAHO